

METRICHECK™

Outil de détection de l'endométrite chez les vaches


Notice d'utilisation



Instructions :

Le Metricheck™ ne doit être utilisé que par un vétérinaire, ou sous la direction d'un vétérinaire.

1. Nettoyez la vulve de la vache de toute matière fécale.
2. Nettoyez et désinfectez soigneusement le Metricheck™ dans un désinfectant approprié avant toute utilisation.
3. Lubrifiez la surface extérieure de la coupelle d'examen. Évitez de déposer du lubrifiant dans la coupelle.
4. Insérez délicatement le Metricheck™ dans le vagin, jusqu'au col de l'utérus (voir image 1 ci-dessous).
5. Retirez le Metricheck™ avec précaution, tout en soulevant légèrement l'extrémité de la poignée afin que la coupelle d'examen entre en contact avec la paroi du vagin.
6. Inspectez la coupelle d'examen à la recherche de possibles signes d'infection.

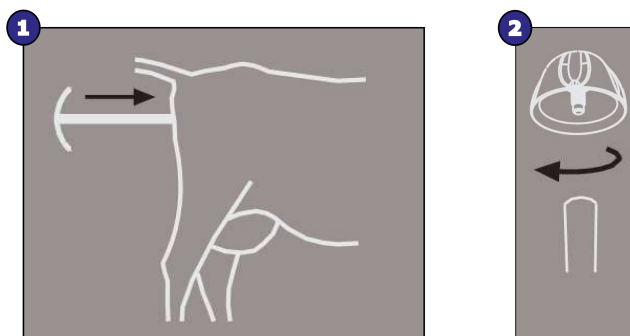

Informations importantes :

Nettoyez toujours soigneusement le Metricheck™ dans un désinfectant approprié avant de tester chaque vache.

Assurez-vous toujours que la coupelle d'examen soit bien vissée à la tige du Metricheck™. Vissez la coupelle d'examen dans le sens des aiguilles d'une montre pour la resserrer, ou dans le sens inverse pour la retirer (voir image 2 ci-dessus).

Les coupelles d'examen doivent être remplacées fréquemment. Les coupelles de rechange peuvent être facilement fixées ou retirées à la main. Jetez les coupelles d'examen usagées entre chaque troupeau.

Ce produit doit être rincé au moins trois fois à l'eau claire pour éliminer tous les résidus, puis jeté conformément aux réglementations locales. Les composants métalliques peuvent être recyclés.

Mise en garde: ne jamais forcer excessivement sur le Metricheck™